



et



vous offrent ce masque « grand public » pour  
contribuer à la lutte contre le COVID-19

## BIEN PORTER SON MASQUE, POUR BIEN SE PROTÉGER

MODÈLE ADULTE

**RAPPEL :** Ce masque doit être utilisé en complément du strict respect de l'ensemble des mesures barrières édictées par le Ministère de la Santé (se laver les mains régulièrement, se tenir à une distance d'un mètre).

Si je le porte correctement, ce masque me protège  
et protège aussi les autres.

### QUEL MASQUE ?


Il s'agit d'un masque barrière grand public à usage non sanitaire testé par la Direction Générale de l'Armement (RP/20-2017/DGA MNRBC/2000305/NP).

Il est composé de coton et de polyester et a la particularité d'être lavable. Il bénéficie d'un traitement anti-bactérien. Recommandations : à porter maximum 4 heures par jour. Le laver ensuite.


### COMMENT PORTER LE MASQUE ADULTE ?



Se laver les mains.

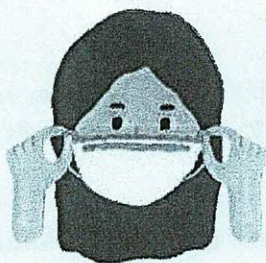

Enfiler le masque en passant les élastiques derrière les oreilles. Face blanche à l'extérieur.

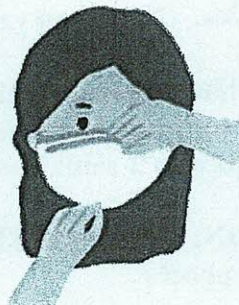

Vérifier que le masque couvre bien le menton et le nez.



Une fois bien placé, ne plus toucher au masque et au visage.



Pour retirer le masque, veiller à ne toucher que les élastiques.

### COMMENT L'ENTREtenir ?

**IMPORTANT :** le masque doit impérativement être lavé avant la première utilisation.

- Lavage à 60° pendant 30 minutes minimum.
- Lavable de 5 à 30 fois, en fonction des conditions d'utilisation (durée journalière d'usage, exposition à la poussière et salissures...). Le masque devra être déclaré non conforme par l'utilisateur en cas de déformations ou d'usure constatée visuellement.
- Séchage au sèche-linge si possible, ou au sèche-cheveux.
- Après le cycle d'usages, le masque doit être jeté dans une poubelle fermée.